


INDICAZIONI D'USO

Le Chewies Seaters vengono utilizzate per coadiuvare il posizionamento delle *Smile Up* aumentando la performance della mascherina.

Si consiglia di praticare l'esercizio con la Chewies Seater almeno 3 volte al giorno per circa 5/7 minuti.

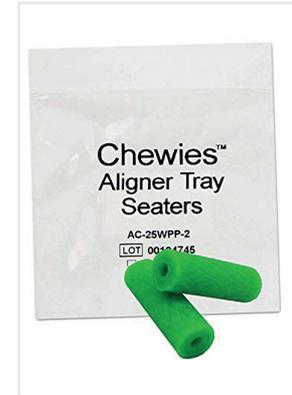

ISTRUZIONI

1. Posizionare manualmente le *Smile Up* sopra i denti esercitando una leggera pressione finchè non sia quasi completamente posizionato.
2. Interporre la Chewies Seater tra le arcate.
3. Mordere delicatamente la Chewies Seater spostandola da un'estremità dell'arcata dentale all'altra. Questo esercizio aiuterà le mascherine a calzare meglio incrementando la performance della *Smile Up*.